























治疗过程中，如果想结束治疗，应先将输出调节钮（7）逆时针方向调回0位（调到不能动为止），按动定时选择键（14）“”，将仪器复位，然后将电极从患者身上取下。

如遇突然停电，应将输出调节电位器旋钮逆时针旋到0位，防止来电后仪器输出闭锁。

选择“不定”或“直流”停止治疗时，要将输出电流调到0位，然后取下电极。

## 电针灸

在传统针灸的基础上通过对针灸针施加一定的脉冲电流，增强针灸的刺激作用，这种方法称为电针灸。电针连接方法见图2，具体操作方法是：将患者消毒后，将已消毒的毫针刺入人体，再将电极线上的鳄鱼夹夹在针柄上，不得与患者直接接触。然后非常缓慢地调节输出电流，只需很微小的电流。因为针电极接触面积比较小，电流密度比较大，很容易超过 $2\text{mA}/\text{cm}^2$ ，所以调节电流时，旋钮要调的非常慢，切勿突然增大，引起肌肉强烈收缩，造成弯针、断针或晕针意外，这是特别要注意的。电流强度以有轻微的麻刺感、振动感或肌肉颤动感为止。另外，与毫针电极配套使用需外购的毫针，应为取得医疗器械注册证产品。











